

## Apteo termofor z pestek wiśni różowy



Cena: 16,98 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis pharma
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Termofor z pestek wiśni w pokrowcu - różowy

KOLOR RÓŻOWY

### Opis produktu:

Termofor z pestek wiśni w pokrowcu, termofor z pestek wiśni wykonany jest z naturalnego surowca, pestek wiśni z polskich upraw umieszczonych w pokrowcu wewnętrznym ze 100-procentowej bawełny

Pokrowiec zewnętrzny wykonany jest z tkaniny Minky (poliester)

### Skład:

- wkład materiałowy 100% bawełna + wypełnienie pestki wiśni 180g
- miękki i przyjemny w dotyku pokrowiec zewnętrzny 100% poliester

### Wskazania:

**Stosowany na zimno:**

- przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń

**Stosowany na ciepło:**

- przynosi ulgę w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt
- dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśniowymi i stawów, poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie
- może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi

**Sposób użycia:**

- Podgrzewać w mikrofalówce o mocy 300 - 600W przez maks. 1 min
- Podgrzewać bez pokrowca zewnętrznego

**Jako zimny okład:**

- umieścić termofor w zamrażarce na ok. 30-60 minut

**Jako ciepły okład:**

- umieścić termofor w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maks. 1 minutę
- umieścić termofor w piekarniku rozgrzanym do 120 stopni na ok. 4 minuty
- umieścić termofor na grzejniku (kaloryferze), aż będzie wystarczająco podgrzany i ciepły

Gotowy do użycia wyrób włożyć w pokrowiec zewnętrzny i przyłożyć do miejsca ciała wymagającego oziębienia lub rozgrzania.

Wyrób będzie utrzymywał temperaturę do 30 minut w zależności od wielkości termoforu i temperatury otoczenia.

**Czyszczenie:**

- w przypadku zabrudzenia pokrowiec należy prać ręcznie

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- unikać silnego nacisku np. siadania na wyrobie - grozi to rozerwaniem pokrowca
- nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków ponieważ grozi to oparzeniem
- nie używać uszkodzonego termoforu
- **termofor należy schładzać i rozgrzewać bez pokrowca zewnętrznego, gdyż może spowodować to jego zniszczenie!**
- nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków, ponieważ grozi to zapłonem pestek

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

## Podmiot odpowiedzialny:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.