

## Aqua-Gel, Opatrunek hydrożelowy, odleżyny, oparzenia, rany, 10x12cm, 1 sztuka



Cena: 10,92 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	KIK GEL-KIK MIROSLAW UJAZD ŚL.
Substancja czynna	Emplastry hydropolymerosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy, 12 cm x 10 cm -1 sztuka ( z opakowania zbiorczego)

Rozmiar: 10x12 cm

### Opis:

Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy, 1 sztuka

- wyrób medyczny,
- zapewnia wilgotne środowisko na powierzchni rany,
- rozmiar: 10 cm x 12 cm.

## Działanie:

### Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy

- zapewnia wilgotne środowisko na powierzchni rany, co wspomaga oczyszczanie autolityczne z martwych tkanek oraz wpływa na procesy ziarninowania i naskórkowania rany,
- dobrze przylega do rany, lecz nie przykleja się do niej,
- jest hipoalergiczny - nie powoduje uczuleń,
- ma zdolności absorpcyjne, pochłania wysięk z rany i zatrzymuje go wraz z bakteriami,
- jest elastyczny i umożliwia opatrywanie trudno dostępnych części ciała,
- umożliwia obserwację powierzchni rany, dzięki swojej przezroczystości,
- umożliwia "oddychanie" rany,
- łagodzi powstawanie blizn przerostowych,
- działa kojąco w przypadku powierzchniowych oparzeń i obrzęków spowodowanych np. przez ukąszenia owadów.

## Wskazania:

Aqua-Gel opatrunek hydrożelowy może być stosowany przy:

- oparzeniach I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne),
- oparzeniach słonecznych,
- owrzodzeniach,
- odleżynach,
- innych ranach przewlekłych, np. stopa cukrzycowa,
- otarcia, stłuczenia, obrzęki.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

Aqua-Gel aplikuje się na powierzchnie rany dowolną stroną. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.

1. Rozerwać torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem.
2. Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjmij hydrożel z foremki.
3. Zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek.
4. Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią

ropną. W tych sytuacjach konieczne jest chirurgiczne oczyszczenie rany przed zastosowaniem opatrunku.

- Opatrunek wyjęty z opakowania, a nie wykorzystany traci jałowość i nie może być użyty w późniejszym czasie.
- Do jednorazowego użytku.
- Ponowne użycie grozi zakażeniem rany.
- Zalecany czas utrzymywania opatrunku na ranie wynosi 48 godzin.
- Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu opatrunku można umieścić na jego zewnętrznej powierzchni warstwę gazy zwilżonej roztworem soli fizjologicznej.
- Przechowywać w temperaturze 0-25oC.
- Chronić od wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.