

Aquacel Ag+ Extra, opatrunek hydrowłóknisty, 5 x 5 cm, 1 sztuka



Cena: 7,05 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	CONVATEC LTD.
Substancja czynna	Emplastru collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Aquacel Ag+ Extra, opatrunek hydrowłóknisty, 5 x 5 cm - 1 sztuka

Opis:

- Wyrób medyczny **Aquacel Ag+ Extra** to hydrowłóknisty opatrunek z dodatkiem srebra przeznaczony do różnego rodzaju zainfekowanych ran lub ran z podejrzeniem infekcji.

Działanie:

- Opatrunek **Aquacel Ag+ Extra** dzięki obecności jonów srebra niszczy biofilm bakteryjny, w tym także bakterie antybiotykooporne m.in.: MRSA, VRE. Produkt dostosowuje się dołożyska rany i żeluje w kontakcie z wysiękiem, co zapewnia optymalne, wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia. Dwie warstwy włókien szybko absorbują nadmiar wysięku wraz ze znajdującymi się w nim bakteriami i enzymami proteolitycznymi, natomiast pionowy kierunek wchłaniania zapobiega maceracji skóry wokół rany.

Wskazania:

- Opatrunek wskazany jest do stosowania na różnego rodzaju zainfekowane rany lub rany z podejrzeniem infekcji.
- Można go aplikować m. in.: na owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni (żylne, tętnicze oraz mieszane), odleżyny o pośredniej i pełnej grubości, rany chirurgiczne, pourazowe, rany narażone na krwawienie (np. na skutek chirurgicznego, czy mechanicznego oczyszczenia), rany onkologiczne z wysiękiem (np. ziarniniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńniowy), a także na rany, w których bakterie są przyczyną wolniejszego procesu leczenia i rany, w których nie obserwuje się postępu leczenia.

Stosowanie produktu:

- Produkt należy zmieniać w zależności od obrazu klinicznego rany i ilości wysięku, jednak nie rzadziej niż co 7 dni.
- W razie potrzeby produkt można dowolnie przycinać bez ryzyka utraty jego właściwości.
- W przypadku ran powierzchniowych opatrunek powinien pokrywać skórę na obszarze minimum 1 cm wokół rany, w przypadku ran głębokich należy wypełnić ją do 80% głębokości.
- Przy stosowaniu na rany z małym wysiękiem, po nałożeniu opatrunku należy zmoczyć obszar nad raną za pomocą sterylnego roztworu soli fizjologicznej.
- W przypadku zmniejszenia ilości wysięku i wyschnięcia opatrunku w trakcie stosowania, aby zdjąć go bezboleśnie należy zmoczyć go sterylnym roztworem soli fizjologicznej i odczekać, aż ponownie się zżeluje.

Zawartość opakowania:

- W opakowaniu znajduje się jeden opatrunek o wymiarach 5 x 5 cm.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.