

Aquacel Ag Foam, opatrunek 10x10 cm z przylepcem, 1 sztuka



Cena: 26,00 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastru collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Aquacel Ag Foam opatrunek piankowy hydrofiber z dodatkiem srebra - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10cm

Opis produktu:

Aquacel Ag Foam to sterylny opatrunek piankowy Hydrofiber z dodatkiem jonów srebra. Opatrunek może być przylepny lub nieprzylepny.

Skład:

- wodoodporna zewnętrzna błona poliuretanowa
- wielowarstwowa część chłonna składająca się z:
- warstwy pianki poliuretanowej

- włókniny
- warstwy kontaktowej z raną z karboksymetylocelulozy zawierającej 1,2% jonów srebra

Właściwości:

- pochłanianie dużych ilości płynu wysiękowego
- przeciwbakteryjne
- bariera ochronna przed bakteriami i wirusami

Zastosowanie:

- rany zakażone lub takie, w których występuje zwiększone ryzyko zakażenia
- oparzenia pośredniej grubości skóry (II stopnia)
- cukrzycowe owrzodzenia stóp, owrzodzenia podudzi (owrzodzenia żyłne, owrzodzenia tętnicze oraz owrzodzenia nóg o mieszanej etiologii) oraz rany odleżynowe (płytkie i o pełnej grubości)
- rany chirurgiczne
- rany traumatyczne
- rany, które mają skłonność do krwawień, takie jak rany, które zostały mechanicznie lub chirurgicznie oczyszczone
- rany onkologiczne z wysiękiem, takie jak ziarniniak, skórne guzy rakowe, przerzuty skóry, mięsak Kaposiego

Sposób aplikacji:

- Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka oczyszczającego oraz osuszyć skórę wokół rany.
- Rozmiar opatrunku należy dobrać tak, aby zakrył ranę i otaczającą ją skórę.
- Opatrunek może być dowolnie przycinany w zależności od kształtu i wielkości rany.
- Opatrunek należy przymocować przylepcem lub bandażem.
- Opatrunek Aquacel Ag Foam może pozostać na ranie do siedmiu dni.
- Opatrunek należy zmienić, gdy są wskazania kliniczne takie jak wyciek, nadmierne krwawienie lub większy ból.
- Aby usunąć opatrunek, należy delikatnie podnieść jeden róg. Kontynuować aż wszystkie brzozy opatrunku będą odklejone, następnie ostrożnie podnieść opatrunek.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem opatrunku Aquacel Ag Foam należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na opatrunek lub na którykolwiek składnik opatrunku

- wrażliwa skóra

Środki ostrożności:

- wystąpienie podrażnień (zaczerwienienie, stan zapalny), maceracji (biała, rozmiękczone warstwa skóry wokół rany) lub hipergranulacji (nadmierne tworzenie się tkanki)
- w zespole stopy cukrzycowej należy kontrolować stężenie glukozy we krwi

Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Podmiot odpowiedzialny:

ConvaTec Polska Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.