

# Aspirator Katarek Complete Secure+



Cena: 69,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Duna Sp. z o.o.
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Aspirator do odkurzacza KATAREK Complete SECURE+ - 1 sztuka

### Opis produktu:

Aspirator Katarek Plus to wyrób medyczny, dzięki któremu **skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzielin z noska malca, przynosząc mu natychmiastową ulgę**. Cały proces odciągania wydzieliny jest **całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka**, już od pierwszego dnia życia. **Rozkręcana komora** aspiratora Katarek Plus ułatwia utrzymanie aspiratora w czystości, ergonomiczny kształt wpływa na zwiększenie komfortu podczas jego użytkowania, zaś długi wążek gwarantuje swobodę ruchów.

Aspirator Katarek Plus podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800-1800 W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, iż jest on znacznie skuteczniejszy niż ustne aspiratory, które usuwają jedynie 1 wydzielinę, nie wspominając już o tradycyjnych gruszkach.

### W skład Katarek Complete Secure+ wchodzi:

- 1 x Katarek Plus aspirator kataru
- 1 x Katarek Secure+ roztwór soli fizjologicznej NaCl 0,9% 20 x 5ml

## Sposób użycia:

1. Połącz komorę aspiratora w miejscu nacięcia i przekręć do oporu.
2. Do powstałej komory dołącz końcówkę.
3. Stożkowy koniec aspiratora włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800-1800W).
4. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Kończówkę A przyłóż do otworu nosowego i odciągaj katar 5-10 sekund.  
Czynność powtórz na drugiej dziurce.
5. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

## Odciąganie:

Odciąganie - ma na celu usunięcie rozrzedzonej wcześniej wydzieliny z nosa dziecka.

Odciąganie to moment kluczowy w oczyszczaniu nosa u dziecka.

- Właśnie ten etap odpowiada za prawidłowe i skuteczne udrożnienie dróg oddechowych.
- W celu przeprowadzania procesu efektywnie i w pełni bezpiecznie, należy użyć aspiratora marki Katarek, wchodzącego w zestaw do Metody 3 Kroków - Katarek Plus.
- Wykorzystując siłę ssącą odkurzacza, aspirator umożliwia jednostajne i szybkie usunięcie wydzieliny, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Zamocuj aspirator Katarek do rury od odkurzacza, ustal siłę ssania na najniższym poziomie, a następnie przykładając do jednej, a następnie drugiej dziurki noska dziecka odessij katar. Pamiętaj, żeby nie wkładać końcówki aspiratora do nosa dziecka, a po odessaniu umyj aspirator zgodnie z załączoną instrukcją.

## Oznakowanie Katrek Secure+ roztwór soli fizjologiczny NaCl 0.9% 20 x 5ml:

Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0.9% NaCl w jednorazowych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu, przeywania ran oraz do inhalacji. Katarek Secure+ roztwór soli fizjologiczny NaCl0.9% może być używany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych.

- Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
- Zawartość zużyć od razu po otwarciu.
- Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
- Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
- Nie używać do iniekcji.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka lub rany.
- Chronić przed dziećmi.

## Przeciwwskazania:

Chorzy na hemofilię powinni skonsultować się z lekarzem. W przypadku używania produktu u więcej niż jednego dziecka, zawsze używaj czystego aspiratora aby uniknąć możliwych infekcji.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie :
- CE 0459 - Roztwór fizjologiczny
- CE 0123 - Katarek Complete Secure+
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

## Podmiot zestawiający:

Duna Sp. z o.o.