

Aspirator Sopelek 2w1 1 sztuka



Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Salus
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Aspirator sopelek 2w1 - 1 sztuka

Opis produktu:

Aspirator do nosa SOPELEK 3+ w dwóch wersjach: odciąganie za pomocą ust oraz odciąganie za pomocą odkurzacza, umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania. Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc).

- odciąganie wydzieliny z noska za pomocą ust
- adapter do podłączenia do odkurzacza - odciąganie kataru za pomocą odkurzacza
- 10 jednorazowych filtrów + 2 szt. podkładow higienicznych

Sposób użycia aspiratora do ust:

- Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym na główny cylinder aspiratora,
- Delikatnie wsuń końcówkę do otworu nosowego dziecka, a ustnik włóż do swoich ust,
- Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik,

- Powtórz wymienione czynności przy drugim otworze nosowym,
- Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem i wyrzuć ją.
- Końcówkę można użyć ponownie, pod warunkiem wyparzenia jej wrzątkiem i wymiany jednorazowego filtra na nowy.
- Jeśli dziecko ma trudności w oddychaniu, lub katar jest gęsty, przed odciągnięciem wydzieliny można wkropić do nosa dziecka kilka kropli roztworu soli morskiej izotonicznej, lub soli fizjologicznej przeznaczonej do użycia donosowego.

Sposób użycia aspiratora do odkurzacza:

- Umieszczamy adapter w rurze ssącej odkurzacza. Odkurzacz ustawiamy możliwie najdalej od dziecka i włączamy urządzenie. Maksymalna moc odkurzacza to 1000 W.
- Ułóż dziecka w dogodnej pozycji. Powoli dosuń końcówkę aspiratora blisko jednego otworu nosa dziecka. Odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruchami góra-dół.
- Po odciągnięciu wydzieliny z jednego otworu noska, odciągamy ją w taki sam sposób z drugiego otworu.
- Umieszczamy odkurzacz. Zdejmujemy końcówkę z cylindra. Możemy ją wyrzucić lub umyć i wyparzyć w gorącej wodzie (ok. 90 stopni celcjusza przez maksymalnie 15 sekund). Wyjmujemy mały korek z cylindra, wyrzucamy filtr jednorazowy. Korek myjemy w gorącej wodzie.
- Wężyk i adapter wystarczy umyć w ciepłej wodzie.
- Umyty aspirator wysusz i włóż ponownie do pudełka.

W skład aspiratora Sopelek wchodzi:

- aspirator
- adapter
- 10 filtrów
- 2 podkłady
- pudełeczko

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykieta
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta

Producent:

Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice