

Ciśnieniomierz Omron automatyczny naramienny M7 Intelli IT

Cena: 349,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny, model M7 Intelli IT (HEM-7361T-EBK)

- Ciśnieniomierz OMRON M7 Intelli IT z mankietem Intelli Wrap - prosty sposób na uzyskanie dokładnych wyników.
- Wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, umożliwiając monitorowanie choroby w warunkach domowych i zapewniając spokój umysłu.
- Urządzenie jest zgodne z naszą unikalną aplikacją **Omron connect**, która zapewnia możliwość śledzenia i udostępniania danych medycznych.

Opis produktu:

- Mankiet Intelli Wrap - dokładne wyniki pomiarów w dowolnej pozycji dookoła ramienia
- Aplikacja mobilna OMRON connect na urządzenia iPhone/Android
- Wskaźnik AFib - wykrywa możliwość występowania migotania przedsionków
- Walidacja kliniczna dla ogólnej populacji, kobiet w ciąży oraz diabetyków

- Funkcja 3 kolejnych pomiarów w 30-sekundowych odstępach
- Funkcja pomiaru w trybie porównawczym
- Średnie tygodniowe dla porannych i wieczornych pomiarów
- Wskaźnik wysokiego ciśnienia
- Wykrywanie nieregularnego bicia serca
- Wskaźnik ruchu ciała
- Wskaźnik założenia mankietu
- Pamięć - 100 pomiarów x 2 użytkowników
- Tryb gościa

Zawartość opakowania:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet (HEM-FL31)
- 4 bateria AA
- Instrukcja obsługi 1 i 2
- Karta gwarancyjna
- Pokrowiec
- Instrukcja konfiguracji

Sposób użycia:

- 5 minut przed odpręż się i odpocznij
- Załóż mankieta na lewe ramię
- Koniec mankieta wyposażony jest w przewód powietrza, powinien znajdować się 1-2 cm powyżej zgięcia łokcia.
- Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiń starannie mankieta aby się nie zsuwał
- Przyjmij prawidłową pozycję ciała.
- Usiądź wygodnie, opierając plecy i ramię
- Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca
- Stopy ułożyć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać
- Po naciśnięciu przycisku START/STOP następuje pomiar i jego automatyczny zapis

Ostrzeżenia:

- Nigdy nie należy stawiać rozpoznania ani samodzielnie podejmować leczenia na podstawie uzyskiwanych odczytów. **KAŻDORAZOWO** należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas dokonywania pomiarów na prawym ramieniu przewód powietrza powinien znajdować się obok łokcia. Należy uważać, aby nie oprzeć ręki na przewodzie powietrza.
- Ciśnienie krwi w lewym i prawym ramieniu może się różnić i dawać inne odczyty. Pomiarów należy zawsze wykonywać na tym samym ramieniu.
- Nie należy rozmontowywać ani podejmować prób naprawy ciśnieniomierza ani jego części. Może to prowadzić do niedokładnych odczytów.

Utylizacja:

- Należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych
- Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- **Produkt posiada 5 letnią gwarancję**

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefarm Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław