

Kleszcz out przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Albert Polska
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Przyrząd do usuwania kleszczy, Kleszcz out

Przyrząd służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka oraz jadu po ukąszeniach owadów (**komarów, pszczoł, szerszeni itp**), **żmij, skorpionów**. Doskonale sprawdza się przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Dwa sposoby użycia:

- do usuwania kleszczy z ciała człowieka
- do usuwania jadu po ukąszeniach owadów (komarów, pszczoł, szerszeni itp), żmij, skorpionów.

Przyrząd do usuwania kleszczy **KleszczOut** jest prostą w użyciu pompką, która pozwoli szybko i precyzyjnie pozbyć się kleszcza z ciała. Wszechstronna i wysokiej jakości pompka poradzi sobie nie tylko z kleszczem, ale również zassie jad po ukąszeniu – komarów, pszczoł, czy nawet żmij i skorpionów.

Produkt dedykujemy osobom aktywnym, spędzającym dużo czasu na wypoczynku, spacerach, podczas grzybobrania lub pracy w plenerze.

Zasada działania:

- Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje “wyssanie” kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele człowieka.
- Przyrząd jest najbardziej skuteczny we wstępnym okresie wszczęcia się kleszcza.
- W przypadkach bardziej skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza.
- Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki, skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas.

Stosowanie:

- Aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu.
- Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczęcia się kleszcza (wprowadzenia jadu).
- Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnej części przyłożenia końcówki.
- Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
- Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.
- Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia:

- Usunięcie kleszcza może okazać się utrudnione w przypadku wszczęcia się go w miejscach uniemożliwiających wytworzenie próżni np. we włosach, w zagłębieniach, na zgięciach.
- Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządach płciowych
- **Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.**
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik mieszka.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Certyfikowany System ISO 13485
- W 100% higieniczny i bezpieczny
- Bezpieczny dla skóry, nie zawiera ftalanów.

Producent/Dystrybutor:

Albert Polska Sp. z o.o. ul. Obwodowa 4a 32-410 Dobczyce