

Sanity, Gruszka Katar stop, z miękkim końcem nr 11



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanity
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity Gruszka (Nr 11) katar stop - 1 sztuka

Opis produktu:

Szybki i prosty sposób na katar

Gruszka katar stop to wysokiej jakości wyrób medyczny spełniający wysokie wymagania i normy bezpieczeństwa. Jest wykonana z najlepszej klasy materiałów plastycznych.

Miękka i zaokrąglona końcówka zapewnia bezpieczeństwo i komfort w trakcie stosowania.

Zastosowanie:

Sanity Gruszka z miękkim końcem nr 11 to wyrób medyczny przeznaczony do codziennej pielęgnacji i udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych.

Sposób użycia:

- **Na sucho** - zasysanie. Udrażnianie nosa z wydzieliny kataralnej oraz oczyszczanie uszu z wody i woskowiny

- **Na mokro** - irygacja oczyszczanie wodą nosa, podrażnionej skóry lub części intymnych

Instrukcja użycia:

- Ściśnij gruszkę i przyłóż końcówkę do nosa lub ucha dziecka, a następnie delikatnie zasysaj wydzielinę. Przed każdym użyciem wymyj gruszkę bieżącą wodą, a następnie włóż do gotującej się wody na kilka minut.
- Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie należy stosować środków dezynfekujących.
- W razie ewentualnego uszkodzenia wyrzucić gruszkę do kosza.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, Dobczyce.