

Apteo, Woda morska, izotoniczna dla dzieci od 1. miesiąca życia, 100 ml



Cena: 25,73 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Synoptis pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Apteo, Woda morska, izotoniczna dla dzieci od 1. miesiąca życia, 100 ml

Wyrób medyczny Woda morska to naturalny, izotoniczny spray do nosa zawierający wodę morską bogatą w minerały i mikroelementy, pochodzącą z wód głębinowych Oceanu Atlantyckiego. Roztwór soli zawarty w wodzie morskiej rozrzedza gęstą wydzielinę i przynosi ulgę śluzówce nosa oraz zatok w czasie przeziębienia. Wyplukuje z nosa kurz i alergeny oraz ułatwia swobodne oddychanie. Produkt polecany jest także pacjentom onkologicznym, którzy zmagają się z suchością i podrażnieniem śluzówki nosa i zatok. Regularne stosowanie wyrobu poprawia nawilżenie śluzówki nosa i zatok, co skutecznie zapobiega infekcjom bakteryjnym i wirusowym oraz alergiom.

Wskazania do stosowania wyrobu Woda morska to:

- codzienna higiena i oczyszczanie nosa oraz zatok,
- nawilżanie suchej śluzówki nosa i zatok,
- pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego,
- łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa i zatok w stanach infekcji i alergii,

- nawilżanie podrażnionej błony śluzowej nosa i zatok pacjentów onkologicznych.

Woda morska jest produktem bezpiecznym nawet przy długotrwałym używaniu, ponieważ nie zawiera substancji leczniczych oraz konserwantów. Pojemnik ze sprayem do nosa może być używany pod dowolnym kątem.

Skład:

Naturalna woda morska, woda demineralizowana.

Sposób użycia:

- Zdjąć nasadkę z aplikatora, a następnie delikatnie wsunąć jego końcówkę do każdego otworu nosowego i nacisnąć na 1-2 sekundy.
- Pojemnik ze sprayem do nosa może być używany pod dowolnym kątem.
- Po każdym użyciu należy umyć aplikator mydłem i spłukać letnią wodą.

Dawkowanie:

- **Niemowlęta od 1. miesiąca życia i dzieci do 6. roku życia:** 1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.
- **Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli:** 1-3 dawki do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu.
- Produkt donosowy, unikać kontaktu z oczami.
- Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
- Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
- W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.
- W przypadku podrażnionej śluzówki nosa, podczas stosowania wyrobu Woda morska może wystąpić uczucie pieczenia, które jest normalnym objawem występującym w trakcie stosowania wyrobów zawierających sól morską.

Uwaga:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

- Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
- Chronić przed dziećmi.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 100 ml

Producent:

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k., ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków.

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Adres: ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

E-mail: office@synoptispharma.com