

Avilin, Spray opatrunek adhezyjny, 90ml



Cena: 41,74 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Nes Pharma
Substancja czynna	Emplastri polymerosa
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Avilin, Spray opatrunek adhezyjny, 90ml

Sterylny wyrób medyczny do stosowania zewnętrznego - opatrunek adhezyjny w leczeniu przewlekłych i trudno gojących się ran.

Właściwości:

- Spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku.
- Tworzy barierę ochronną.
- Jest stabilny chemicznie i odporny na środowisko w jakim się znajduje.
- Nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym.
- Ze względu na swoją strukturę chemiczną i właściwości fizyko-chemiczne stwarza optymalne środowisko do naturalnych procesów gojenia i regeneracji skóry.

Sposób użycia:

- Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, jeden raz dziennie.
- Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą.
- Po użyciu wyrobu medycznego Avilin Spray opakowanie ponownie zamknąć zatyczką plastikową.

UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka.

Wskazania do stosowania:

- Owrzodzenia żylakowate goleni.
- Rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego),
- Zespół stopy cukrzycowej.
- Odleżyny (owrzodzenia troficzne).
- Rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego).
- Inne rany.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Rany z silnym krwawieniem.
- Rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy.
- Rany z cechami zakażenia.
- Rany z dużą ilością wysięku.
- Rany z treścią ropną.
- Uczulenie na składniki preparatu.

W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray należy skonsultować ze specjalistą.

Składniki:

100% Polimer E (eter poliwinyllobutylowy).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje:

- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE1434.
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

- Produkt łatwopalny
- Chronić przed światłem słonecznym
- Nie palić
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem
- Nie przekłuwać ani nie spalać
- Nie aplikować do oczu.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności.
- Sporadycznie możliwe występowanie zaczerwienia, lub swędzenia w miejscu stosowania.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- Wyrób medyczny Avilin Spray należy stosować w temp. +5 do +50 °C, przechowywać oraz transportować w temperaturze -5 do +50 °C.

Objętość netto: 90ml

Producent:

Nes Pharma spółka jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów.