

Bobo-Test DUO, test ciążowy strumieniowy + płytkowy, 1 sztuka



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------|
| Producent / Marka | Bobo-test |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

WYRÓB MEDYCZNY

Bobo- test DUO 2w1, test ciążowy płytkowy + strumieniowy, 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

BOBO-TEST DUO mix to opakowanie 2 testów ciążowych strumieniowego i płytkowego o różnych czułościach. Oba testy cechuje duża wiarygodność wyniku 99%, krótki czas oczekiwania na wynik badania oraz prosty i samodzielny sposób użycia.

Test Strumieniowy

Test o czułości 10 mIU/ml pozwala wykryć już 2- dniową ciążę. Test jest prosty i wygodny w użyciu - nie wymaga wcześniejszego zebrania próbki moczu. Wystarczy tylko skierować pasek absorpcyjny pod strumień moczu, a łatwy do odczytania wynik pojawi się w ciągu 5 minut.

Test Płytkowy

Test o czułości 25 mIU/ml wykrywa ciążę od jej 6 dnia. Przy pomocy pipety należy nanieść kilka kropli moczu na płytkę testową. W ciągu 5 minut otrzymasz wiarygodny wynik.

Dokładność i czułość

Test ciążowy Bobo jest domowym produktem do wykonywania autodiagnozy. Jest unikatowym produktem, który w szybkim tempie wykrywa hormon ciążowy, nazywany gonadotropiną kosmówkową (hCG), znajdujący się w moczu oraz krwi. Jego poziom wzrasta wraz z rozwojem ciąży, dlatego z każdym dniem test zyskuje na wiarygodności! Bobo test jest wyjątkowym wyrobem medycznym, gdyż potrafi wykryć hormon hCG już w 2-3 dni od jego wzrostu, a jego wiarygodność wynosi aż 99%! Ponadto, po użyciu testu strumieniowego, wynik pojawia się po 5 minutach. Bobo test jest wyjątkowo czułym produktem, ponieważ może wykryć wspomnianą gonadotropinę kosmówkową nawet na poziomie 10ml IU/ml! Jest to niezwykle wynik wśród testów ciążowych.

Charakterystyka:

- prosty (test można przeprowadzić o każdej porze dnia)
- szybki (wynik w ciągu 5 minut)
- wiarygodny (wiarygodność testu wynosi ponad 99%)
- dokładny (potrafi wykryć już 2 dniową ciążę)

Interpretacja wyniku:

- **Wynik ujemny (brak ciąży)** - Wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T. Taki wynik w 99,9% oznacza, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.
- **Wynik dodatni (ciąża)** - Wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowej, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia. Taki wariant wynikowy wskazuje na dużym prawdopodobieństwie, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, udaj się do lekarza specjalisty.
- **Wynik nieważny** - Wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania:

- Instrukcja użycia
- Dwa testy: strumieniowy i płytkowy

Ważne:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga:

- To jest wyrób medyczny do samokontroli. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent/Dystrybutor:

Diagnosis S.A., Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok.