


Nebu-Dose Isotonic, 0,9% roztwór do nebulizacji, 5 ml x 100 ampułek

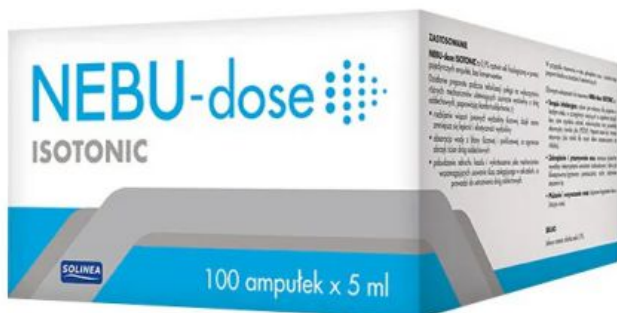

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Solinea
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Nebu-Dose Isotonic, 0,9% roztwór do nebulizacji, 5 ml x 100 ampułek

Nebu-dose Isotonic to wyrób medyczny będący 0,9% roztworem soli w postaci ampułek o pojemności 5 ml. Wyrób ten przeznaczony jest do nebulizacji, ale odpowiedni również do codziennego stosowania w celu płukania i przemywania oczu lub nosa.

Zastosowanie:

Terapia inhalacyjna (nebulizacja), a także płukanie i przemywanie oczu lub nosa.

W terapii inhalacyjnej, gdzie jest wskazany dla pacjentów w każdym wieku, w szczególności tych, którzy chorują na:

- zapalenie oskrzelików,
- ostre zapalenie oskrzeli,
- mukowiscydozę,
- przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP),

W terapii inhalacyjnej jako rozpuszczalnik dla innych produktów leczniczych,

Do płukania i przemywania oczu, w celu zmniejszenia dyskomfortu wywołanego przez niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak:

- przebywanie w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach,
- suche, zanieczyszczone lub zadymione powietrze,

Do płukania i oczyszczania nosa, aby przynieść ulgę w przypadkach suchości lub nieżyty nosa.

Preparat Nebu-dose Isotonic ułatwia usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych i poprawia komfort oddychania:

- zmniejsza poziom lepkości i elastyczności wydzieliny poprzez rozbijanie wiązań jonowych w żelu śluzowym,
- zmniejsza obrzęk ścian dróg oddechowych poprzez absorpcję wody z błony śluzowej i podśluzowej,
- pomaga usunąć śluz z oskrzeli poprzez wywołanie odruchu kaszlu i wykrztuszania wydzieliny, co ułatwia udrożnienie dróg oddechowych.

Sposób użycia:

- **W terapii inhalacyjnej:** 4-5 ml roztworu (zgodnie z zaleceniem lekarza).
- **W higienie oczu:** tyle, ile potrzeba.
- **W higienie nosa:** ile potrzeba, jednorazowo po kilka kropli roztworu do każdej z dziurek w nosie.
- Opakowanie wyrobu zawiera 100 ampułek po 5 ml roztworu.

Terapia inhalacyjna:

- Zwykle w terapii wziewnej używaj ok. 4-5 ml roztworu – zależnie od zalecenia lekarza.
- Stosuj z dowolnym typem nebulizatora.
- Stosuj roztwór zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu, z którego korzystasz do inhalacji.

Higiena oczu (do zakraplania, przemywania lub płukania):

- Roztwór może być stosowany na powierzchnię oka po nałożeniu soczewek kontaktowych.
- Delikatnie nacisnąć ampułkę, aby zakroplić kilka kropli roztworu na powierzchnię oka.
- Powtarzać tyle razy, ile potrzeba.
- Należy odczekać 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego preparatu do oczu.

Higiena nosa (do płukania i oczyszczania suchego lub zatkanego nosa):

- Odchyl głowę do tyłu.
- Wprowadź ostrożnie końcówkę ampułki do otworu nosowego.
- Delikatnie naciśnij ampułkę, zakraplając do nosa kilka kropli.
- Powtórz ten sam proces z drugim otworem nosowym.
- Wyprostuj głowę, aby umożliwić odpływ śluzu.

- Wytrzyj nadmiar płynu.
- Używaj tyle razy, ile potrzeba.
- Nie wydmuchuj nosa przez 10 minut od zastosowania preparatu.

Stosując preparat u niemowląt, należy uważać, aby aplikować roztwór przy użyciu jak najmniejszej siły, celem uniknięcia wytworzenia zbyt dużego ciśnienia lub zanieczyszczenia ucha środkowego, które może spowodować powikłania.

Skład:

Jałowy roztwór chlorku sodu 0,9%.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować razem z innymi wyrobami i lekami, chyba, że po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować preparatu do iniekcji.

Uwagi:

- Nie zawiera konserwantów. Z powodu występowania ryzyka szybkiego rozwoju bakterii, uprzednio otwartych lub uszkodzonych ampułek nie należy stosować.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Przeznaczony do bezpośredniego użycia. Aby uniknąć możliwego roznoszenia infekcji, jedna ampułka może być stosowana wyłącznie przez jedną osobę.
- Nie należy używać jednej i tej samej ampułki równocześnie do oczu i do nozdrzy.
- Przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego preparatu do oczu, odczekać 15 minut.
- Po zastosowaniu preparatu do nosa, nie wydmuchiwać go przez 10 minut.

Ostrzeżenia

- U niektórych, bardzo wrażliwych pacjentów przed zastosowaniem wyrobu medycznego Nebu-dose Isotonic roztwór może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela. Podawanie preparatu takim pacjentom powinno odbywać się wyłącznie zgodnie ze wskazaniami lekarza.
- Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpią skurcze oskrzelików lub uporczywy kaszel należy niezwłocznie przerwać stosowanie wyrobu medycznego i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Chronić od światła.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Unolab Manufacturing, S.L., Av/De las flores 6, 28970 Humanes de Madrid, Hiszpania.

Dystrybutor:

Solinea sp. z o.o., Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn.