

Omron, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny, model M3 Comfort (HEM-7155-E(C)) + zasilacz



Cena: 219,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Omron
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Omron, Ciśnieniomierz automatyczny naramienny, model M3 Comfort (HEM-7155-E(C)) + zasilacz

- Ciśnieniomierz OMRON M3 Comfort to prosty sposób na uzyskanie dokładnych wyników.
- Urządzenie to jest ciśnieniomierzem cyfrowym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u pacjentów dorosłych
- Urządzenie wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru i informuje o nim za pomocą symbolu wyświetlanego wraz z odczytem
- Produkt służy głównie do użytku domowego

Opis produktu:

- Mankiet Intell Wrap - dokładne wyniki pomiarów w dowolnej pozycji dookoła ramienia,
- Walidacja kliniczna dla ogólnej populacji, diabetyków, kobiet w ciąży,
- Wskaźnik nieregularnego bicia serca,
- Wskaźnik wysokiego ciśnienia,

- Wskaźnik ruchu ciała,
- Wskaźnik założenia mankietu
- Pamięć - 2 użytkowników x 60 pomiarów
- Duży ekran

Zawartość opakowania:

- Ciśnieniomierz
- Mankiet (HEM_FL31)
- zasilacz
- 4 baterie AA
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi 1i 2
- Karta gwarancyjna

Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy przeczytać instrukcję obsługi

- 5 minut przed odpręż się i odpocznij
- Załóż mankiet na lewe ramię
- Koniec mankietu wyposażony jest w przewód powietrza, powinien znajdować się 1-2 cm powyżej zgięcia łokcia.
- Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owiń starannie mankiet aby się nie zsuwał
- Przyjmij prawidłową pozycję ciała.
- Usiądź wygodnie, opierając plecy i ramię
- Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca
- Stopy ułożyć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać
- Po naciśnięciu przycisku START/STOP następuje pomiar i jego automatyczny zapis

Ostrzeżenia:

- Nigdy nie należy stawiać rozpoznania ani samodzielnie podejmować leczenia na podstawie uzyskiwanych odczytów. KAŻDORAZOWO należy skonsultować się z lekarzem.

Utylizacja:

- Należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych
- Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Omron Healthcare 53 Kunotsubo, Terado-choMuko, KYOTO 617-0002 Japan

Dystrybutor:

PCF Pocefarm Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F 51-131 Wrocław.

Producent: Omron Electronics Sp. z o.o.
Adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, Budynek 5B 02-092 Warszawa
E-mail: info_pl@omron.com