

## Test ciążowy, BEJBI, strumieniowy 1 sztuka



Cena: 5,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Milapharm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Bejbi test ciążowy strumieniowy- 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

### Opis produktu:

Test ciążowy płytkowy na obecność hCG w moczu jest szybkim testem ciążowym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej ( hCG), która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży

- Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Wyrób do samokontroli
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem
- Szybki - wynik w ciągu 1 minuty
- nie wymaga zbierania moczu do pojemnika
- Wygodny - do użytku o każdej porze dnia

## Działanie:

- Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem wytwarzanym przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i jest wydalany w moczu. Test ciążowy zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. W momencie zakroplenia próbki moczu do miejsca na próbkę moczu na płytce testowej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawi się kolorowa linia. Brak obecności kolorowej linii w obszarze testowym (T) wskazuje na negatywny wynik testu. W ramach procedury kontrolnej, jeżeli test został przeprowadzony prawidłowo, w strefie kontrolnej (C) pojawi się kolorowa linia

## Zawartość zestawu testowego:

- 1 test strumieniowy w foliowej kopertce
- pochłaniacz wilgoci
- instrukcję używania wyrobu

### Uwaga:

- Wewnątrz torebki foliowej znajdują się pochłaniacz wilgoci, który służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie przechowywania i nie jest stosowany w badaniu

## Kiedy wykonać test:

- test może być wykonany o każdej porze dnia. Zaleca się jednak pobranie pierwszej, porannej próbki moczu, ponieważ stężenie hormonu hCG jest wtedy najwyższe

## Jak wykonać test:

- Umieść końcówkę testu bezpośrednio pod strumieniem moczu przez min. 3 sekundy
- Wynik odczytaj w czasie do 5 minut

## Interpretacja wyników:

### Wynik pozytywny - CIĄŻA

Jeżeli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawiły się linie (nawet jeżeli któraś z linii jest mniej wyraźna) oznacza to, że jesteś w ciąży. Intensywność zabarwienia linii może się zmieniać z uwagi na zróżnicowany poziom hCG na różnych etapach ciąży

### Wynik negatywny - BRAK CIĄŻY

Jeżeli linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży. Jeżeli przypuszczasz, że jednak jesteś w ciąży (np. brak miesiączki) badanie można powtórzyć kilka dni później przy użyciu nowego testu

### Wynik nieważny

#### Wynik uznajemy za nieważny jeśli :

- Pojawi się linia tylko w oknie testowym (T) i nie pojawi się w oknie kontrolnym (C)

- Nie pojawi się żadna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C). W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze 2-30 stopni w zamkniętym woreczku foliowym do upłynięcia daty ważności. Data ważności zestawu znajduje się na opakowaniu handlowym i etykiecie
- Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła
- Nie zamrażać
- Wskazane jest otwieranie torebki foliowej tuż przed użyciem testu

## Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 0197.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi oraz interfejs użytkownika w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent: Milapharm sp. z o.o.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Producent: Milpharm Sp. o.o.

Adres: Gen. Józefa Hallera 5/14A, 03-464 Warszawa.

E-mail: [info@milapharm.pl](mailto:info@milapharm.pl)