

TEST OWULACYJNY VITAM LH 5 sztuk paskowy 98% wiarygodny



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	DIAGNOSIS S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

LH VITAM Test owulacyjny Paskowy - 5 pasków

TEST DO SAMOKONTROLI

Opis:

Domowy test owulacyjny jednorazowego użytku.

- **Prosty:** do samodzielnego wykonania
- **Czuły:** wykrywa hormon LH powyżej 25mIU/ml
- **Szybki:** czytelny wynik w ciągu 5 minut
- **Wiarygodny:** dokładność ponad 98%
- **W zestawie:** 5 testów paskowych, instrukcja użycia

Zawartość opakowania:

- 5 testów owulacyjnych,
- Instrukcję użycia,
- Pochłaniacz wilgoci (UWAGA: wewnątrz torebki foliowej znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić)

Stosowanie:

- Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia. Jeżeli masz jakieś pytania, co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na Bezpłatną infolinię 801 70 30 11 w godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
- Foliową torebkę zawierającą test otwórz tuż przed przeprowadzeniem badania.
- Wykonaj test pomiędzy godz. 10-20
- Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
- Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze: 4-30°C. Nie zamrażaj.
- Przechowuj test z dala od dzieci. Chroń przed światłem słonecznym i wilgocią.
- Nie używaj więcej niż jeden raz.
- Nie używaj zestawu testowego jeśli torebka foliowa z testem jest uszkodzona lub nieszczelna.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Kiedy rozpocząć badanie?:

- Jeśli Twój cykl wynosi przeciętnie 26 dni, zacznij badanie
- 10-tego dnia licząc od dnia rozpoczęcia krwawienia miesięczkowego.
- Na początku określ długość Twojego cyklu miesięczkowego - licząc od pierwszego dnia krwawienia, aż do dnia poprzedzającego kolejną miesiączkę.
- Ustal średnią długość cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
- Następnie przyjmując pierwszy dzień krwawienia jako dzień 1 (zaznacz go w kalendarzu), użyj Tabeli 1 aby określić kiedy powinnaś rozpocząć przeprowadzanie testu.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent:

- Diagnosis S.A., ul. Gen. Andersa 38A, Białystok

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Producent: DIAGNOSIS S.A
Adres: ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok
E-mail: diagnosis@diagnosis.pl