

Undofen, Krioterapia, Kurzajki, Brodawki, aerozol na skórę, 50ml



Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Perrigo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Undofen Krioterapia, aerozol na kurzajki i brodawki - 50 ml

Opis wyrobu medycznego:

- Aerozol Undofen Krioterapia jest oparty na takiej samej technice zamrażania, jaką stosują lekarze. Pozwala na skuteczne i szybkie usunięcie brodawki z użyciem metody precyzyjnego zamrażania. Brodawka (kurzajka) zazwyczaj odpada w ciągu 10-14 dni po jednorazowym zastosowaniu. Do tego czasu pod spodem odtwarza się zdrowy naskórek.

Skład:

- Eter dimetylowy, propan (CE 0344).

Zastosowanie:

- Usuwanie kurzajek/brodawek.

Działanie:

- **Undofen Krioterapia** to skuteczna i najszybsza indywidualna metoda leczenia brodawek (kurzajek) w warunkach domowych, oparta na tej samej metodzie zamrażania, którą stosują lekarze. Zazwyczaj już jeden zabieg zamraża brodawkę aż do korzenia. Stare i duże brodawki często wymagają więcej niż jednego zastosowania preparatu **Undofen Krioterapia**.
- **Undofen Krioterapia** natychmiast po użyciu zamraża brodawkę aż do korzenia. Zamrożona brodawka powinna stopniowo zanikać lub odpaść po około 10-14 dniach. Do tego czasu pod spodem wytwarza się zdrowy naskórek.
- Unikalna technologia aplikacji pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury zamrażania (-50°C), a jednorazowe aplikatory zabezpieczają przed przenoszeniem wirusa HPV i gwarantują precyzyjne użycie produktu.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

Wyrób medyczny Undofen Krioterapia można stosować u wszystkich członków rodziny, w tym także u dzieci powyżej 4 roku życia.

- Umieść aplikator piankowy w uchwycie.
- Wciśnij trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy.
- Odczekaj 20 sekund po nasyceniu pianki, aby dodatkowo zredukować temperaturę.
- Przyłóż biały czubek aplikatora piankowego: do brodawki zwykłej (dłoni) na 20 sekund; do brodawki stopy na 40 sekund.
- Po przyłożeniu aplikatora do brodawki skóra może stać się biała i może wystąpić lekki ból oraz pieczenie jako reakcja na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora skóra powinna odzyskać prawidłowy kolor. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu powinno ustąpić w ciągu kilku godzin.
- Stare i duże brodawki mogą wymagać więcej niż jednego zastosowania preparatu Undofen Krioterapia.
- Jeżeli brodawka nie zniknęła po 14 dniach, można bezpiecznie powtórzyć leczenie.
- Jeśli trzykrotne zastosowanie preparatu nie przyniosło efektu, skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku leczenia brodawek (kurzajek) stóp należy użyć dołączonego pilniczka, aby optymalnie przygotować miejsce leczenia - dodatkowe instrukcje przedstawiono w ulotce zawierającej instrukcję użytkowania.

Przeciwwskazania:

- Undofen Krioterapia nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i diabetyków.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- Nie stosować w miejscach, gdzie skóra jest wrażliwa, na skórze z podrażnieniami ani na skórze zainfekowanej, zaczerwienionej; na brodawkach owłosionych, znamionach, ciemnych pieprzykach; skórze o zmienionym kolorze.
- Nie stosować u cukrzyków ponieważ zamrożony obszar skóry może nie goić się tak szybko lub całkowicie.
- Osoby posiadające słabe krążenie krwi powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Zalecane środki ostrożności:

- Jeśli nie ma pewności, że zmiana na skórze jest brodawką, należy skonsultować się z lekarzem
- Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego: nie połykać, nie wdychać, używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Umyć ręce (z wyjątkiem leczonego obszaru) natychmiast po użyciu.
- Używać jedynie za pomocą specjalnego aplikatora znajdującego się w zestawie.
- Należy używać jednego aplikatora do każdej brodawki/kurzajki i nie należy używać go więcej niż raz.
- Nie udostępniaj pilników innym osobom ponieważ brodawki są zaraźliwe.
- Unikaj nadmiernego piłowania brodawki ponieważ może to powodować powstanie niewielkich siniaków lub krwawienia.
- Należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą otaczającą leczoną brodawkę.
- Jeśli blisko siebie znajduje się kilka brodawek, należy usuwać tylko jedną na raz.
- Nie powtarzać leczenia przed upływem 2 tygodni.
- Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Aplikator należy przykładać maksymalnie na 20 sekund (w przypadku brodawek (kurzajek) dłoni) lub na 40 sekund (w przypadkach brodawek stóp).

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

- Po odparnięciu brodawki może pojawić się odbarwienie i/lub niewielka blizna.
- Mogą pojawić się pęcherze, które mogą być bolesne.
- Produkt może spowodować niewielki odmrożenie.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Ważne:

- **Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 0344**
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- **Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.**

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent: Perrigo Poland Sp. z o.o.

Adres: D48 Office, 7 piętro, Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

E-mail: perrigopoland@perrigo.com