

Urgo filmogel, opatrunek w płynie na ukąszenia owadów 3,25 ml



Cena: 31,19 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Urgo filmogel, opatrunek w płynie na ukąszenia owadów 3,25 ml

URGO Filmogel - opatrunek w płynie na ukąszenia owadów.

- W przypadku ukąszenia owadów takich jak: komary, osy, końskie muchy, pająki, śwędziki, pszczoły oraz mrówki.
- Od 1-go roku życia.

Filmogel na ukąszenia owadów, opatrunek w płynie łączy w sobie innowacyjną formułę ochronną (Technology Filmogel) oraz właściwości łagodzące. Po aplikacji produkt tworzy przezroczysty, elastyczny oraz wodoodporny opatrunek.

- Chroni i zapobiega drapaniu.
- Łagodzi uczucie swędzenia.
- Chroni przed czynnikami zewnętrznymi.
- Wodoodporny.

Sposób użycia:

- W przypadku użądlenia usuń delikatnie żądło.

- Przed aplikacją produktu oczyścić, zdezynfekuj, przemyj i osusz miejsce ukąszenia sterylną gazą.
- Należy jednolicie pokryć ukąszone miejsce. W tym celu należy nałożyć i rozsmarować płyn używając szpatułki. Podczas stosowania może pojawić się uczucie pieczenia. Pozostawić do wyschnięcia na kilka sekund.
- Należy stosować tak często jak to konieczne (2-3 razy dziennie). Podczas kolejnego stosowania nie zachodzi potrzeba usuwania poprzedniej warstwy opatrunku.
- Po każdym użyciu należy zamknąć szczelnie opakowanie. Produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

W przypadku potrzeby usunięcia warstwy opatrunku, można to zrobić na dwa sposoby:

- Przeciągnąć brzegi opatrunku.
- Nałożyć na istniejącą warstwę kroplę płynu i natychmiast zetrzeć ją suchą, czystą gazą.

Składniki:

Ethyl acetate, alcohol, nitrocellulose, isopropyl alcohol, ricinus communis seed oil, hydroxypropylcellulose, triticum vulgare germ oil, glycyrrhetic acid.

Ważne:

- Stosować wyłącznie na skórę. Nie połykać.
- Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować u dzieci poniżej 1. roku życia.
- Działa drażniąco na oczy.
- Nie stosować dłużej niż 8 dni bez zasięgnięcia porady lekarskiej.
- Nie palić papierosów podczas stosowania, przed całkowitym wyschnięciem miejsca stosowania oraz przy otwartej butelce.
- Ze względu na brak badań, stosowanie produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie jest zalecane.
- Produktu nie należy stosować na zmienione chorobowo miejsce w wyniku schorzeń dermatologicznych, zmian grzybiczych, zainfekowanych lub sączących ran.
- Produktu nie należy stosować na błonę śluzową (szczególnie ust) oraz w pobliżu oczu. Nie należy stosować w przypadku alergii na jakikolwiek składnik produktu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 28°C
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent:

Labolarories URGO Healthcare - 42 rue de Longvic - 21300 Chenove- France.

Dystrybutor:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Producent: URGO Sp. z o.o.

Adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Email: kontakt@pl.urgo.com