

Urgo, opatrunek w sprayu na rany powierzchniowe, 40 ml



Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Urgo, Opatrunek w sprayu na rany powierzchniowe, 40 ml

URGO Opatrunek w sprayu jest wskazany do stosowania na rany powierzchniowe, otarcia i zadrapania, w szczególności w trudno dostępnych miejscach takich jak łokiec czy kolana, gdzie zwykły plaster może się odklejać.

URGO Opatrunek w sprayu, to leczniczy plaster w płynie, który:

- Zmniejsza ryzyko infekcji - jest antyseptyczny,
- Przyspiesza gojenie ran - pozwala oddychać skórze,
- Dezynfekuje i chroni ranę przed czynnikami zewnętrznymi,
- Jest odporny na działanie wody,
- Zawiera oryginalną formułę Filmogel®.

Właściwości:

Preparat URGO Opatrunek w sprayu został opracowany z myślą o praktycznej, bezpiecznej oraz higienicznej aplikacji. URGO Opatrunek w sprayu to plaster w płynie, który dzięki zawartości technologii Filmogel® tworzy niewidoczną warstwę ochronną, która sprzyja szybszemu gojeniu ran.

- Jest odporny na wodę i ścieranie.
- Umożliwia skórze oddychanie i optymalizuje naturalny proces gojenia.
- Jest wygodny do stosowania w trudnych miejscach takich jak: łokcie, kolana, gdzie tradycyjny plaster może się odkleić.

Sposób użycia:

Produkt rodzinny: dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

- Oczyszczyć i osuszyć ranę.
- Rozpylić roztwór na ranę, przytrzymując butelkę w odległości 5-10 cm.
- Odczekać minutę na wyschnięcie.
- Stosuj ponownie do całkowitego wygojenia się rany.
- **Nie jest zalecane u kobiet w ciąży**

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- Chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE 0459
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent:

Laboratoires Urgo Healthcare, Chenove, Francja.

Dystrybutor:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Producent: URGO Sp. z o.o.

Adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Email: kontakt@pl.urgo.com