

URGO Resistant Neutral plaster z opatrunkiem 1m x 8cm x 1 sztuka



Cena: 11,69 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Urgo

Substancja
czynna

-

Typ produktu

Opis produktu

Wyrób medyczny

URGO Resistant Neutral plaster 1m x 8cm x 1 sztuka

Wyrób medyczny Urgo Resistant Neutral to plaster na taśmie do docinania, dzięki czemu można dopasować go do wielkości rany.

- Odporny, wykonany z wytrzymałej, rozciągliwej tkaniny plaster opatrunkowy do stosowania w celu ochrony ran powierzchniowych.
- Dzięki mikroperforowanemu podłożu plaster umożliwia skórze swobodne oddychanie.
- Plaster nie przykleja się do rany.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Urgo Resistant Neutral plaster przeznaczony do stosowania do opatrywania i ochrony ran powierzchniowych.

Sposób użycia:

- Stosować zewnętrznie.
- Ranę wraz z okolicami oczyścić, zdezynfekować, przemyć i osuszyć. Odciać odpowiednią ilość plastra, używając czystych, odkażonych nożyczek.
- Opatrunek przykleić i wygładzić krawędzie.
- Plaster zmieniać przynajmniej dwa razy dziennie, a także po każdej kąpieli.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0373
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Produkt jednorazowego użytku.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 28°C
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent:

Labolarories URGO Healthcare - 42 rue de Longvic - 21300 Chenove- France.

Dystrybutor:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Producent: URGO Sp. z o.o.
Adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Email: kontakt@pl.urgo.com