

UrgoTul, Absorb, Border, opatrunek, oparzenia, otarcia, odleżyny, 8 cm x 8 cm, 1 sztuka



Cena: 9,33 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastri microfibrillum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoTul Absorb Border, opatrunek, 8 cm x 8 cm -

1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)

Opis:

Rozmiar: 8x8cm

UrgoTul Absorb Border, opatrunek, 1 sztuka

- wyrób medyczny
- samoprzylepny opatrunek piankowy z miękką, przylegającą TLC (technologia lipidowo- koloidowa): z matrycą gojącą, absorbującą oraz atraumatyczną
- rozmiar: 8 cm x 8 cm

- 1 sztuka z opakowania 10 sztuk

Działanie:

Wyrób medyczny **UrgotulAbsorb Border** :

- zapewnia wszystkie korzyści TLC i silikonowych, samoprzylepnych brzegów (wilgotne środowisko, optymalne wyniki gojenia, bezbolesne i bezurazowe zdejmowanie).
- TLC (Technologia lipidowo-koloidowa) to opatentowana, innowacyjna technologia obejmująca unikatowe skojarzenie polimerów i cząsteczek hydrokoloidu, zapewniająca bez bólowe i bez urazowe zdejmowanie opatrunku u pacjentów, przy jednoczesnym pobudzaniu gojenia. Po zetknięciu z wysiękiem rany, cząstki te tworzą żel i stwarzają wilgotne środowisko, korzystne dla procesu gojenia, co umożliwia prawidłowe działanie kluczowych komórek uczestniczących w procesie naprawy (fibroblastów, keratynocytów, makrofagów). W ten sposób UrgoTul Absorb Border zapewnia optymalne wyniki gojenia.
- Chłonna wkładka z pianki poliuretanowej oraz silnie chłonna warstwa opatrunku UrgoTul Absorb Border odpowiadają za pochłanianie nadmiaru płynu, zapobiegając maceracji. Opatrunek nadaje się do stosowania pod bandaż uciskowy, jeśli takie postępowanie zostało zlecone.
- Nieprzepuszczalne dla wody podłoże opatrunku UrgoTul Absorb Border jest miękkie, bardzo wygodne i nieokluzyjne, co umożliwia dobre dopasowanie opatrunku do ran o różnych kształtach oraz zapobiega przedostawaniu się płynu i bakterii przez opatrunek.
- Wysoka przepuszczalność dla gazów zapobiega maceracji tkanek, prowadząc do usunięcia nadmiaru wysięku.
- Opatrunek także rozciąga się w trakcie ruchów pacjenta, zapewniając wygodę.
- Silikonowy przylepiec zapewnia dobre przyleganie opatrunku, możliwość łatwej zmiany miejsca zastosowania opatrunku, a dodatkowo jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.
- Samoprzylepny brzeg sprawia, że zbędne jest dodatkowe zabezpieczanie opatrunku.
- Opatrunek jest przezroczysty, dzięki czemu można kontrolować ilość płynu w ranie, co pozwala na zmianę opatrunku jedynie w razie potrzeby.
- Zapewnia optymalne efekty gojenia.
- Pochłaniania wysięk i drenaż rany, zapobiega maceracji.
- Utrzymuje wilgotne środowisko korzystne dla procesu gojenia rany.
- Bezurazowe i bezbolesne zdejmowanie.
- Nieprzepuszczalny dla wody, silikonowy, samoprzylepny brzeg.
- Bardzo wygodny; łatwa zmiana umiejscowienia opatrunku.

Wskazania:

Wyrób medyczny **UrgotulAbsorb Border** jest wskazany do stosowania na rany:

- rany ostre z wysiękiem,
- ranach ostrych: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne,
- ranach przewlekłych: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Sposób użycia wyrobu medycznego:

1. Przygotowanie rany

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb Border.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.

1. Nakładanie opatrunku

- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb Border (samoprzylepny brzeg silikonowy powinien znajdować się co najmniej 1 cm od rany).
- Wygładzić opatrunek na ranie.
- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.
- Nakładanie odmiany krzyżowej opatrunku
- Umieścić opatrunek tak, aby jego koniec był skierowany w stronę obszaru krzyżowego.

1. Zdejmowanie opatrunku

- Ucisnąć zdrową skórę, unieść róg opatrunku i ostrożnie go odkleić.

1. Zmiana opatrunku

- Opatrunek UrgoTul Absorb Border można zmieniać co 2 do 4 dni, ale nie rzadziej niż co 7 dni w zależności od ilości wysięku i stanu rany.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Natomiast w razie potrzeby można

przyciąć samoprzylepne brzegi nożyczkami, tak aby opatrunek pasował do kształtu rany.

- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Należy usunąć nadmierne owłosienie, obcinając włosy blisko skóry, aby zapewnić dobry kontakt opatrunku ze skórą.
- W przypadku równoczesnego stosowania opatrunku z kremem, emulsją, należy pozwolić na wyschnięcie skóry przed zastosowaniem opatrunku.
- Opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0459
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Producent: URGO Sp. z o.o.
Adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Email: kontakt@pl.urgo.com